


Rポイントマーカークの**厚紙タイプ**ご使用のみなさまへ

# 極薄透明台紙を採用！目視で貼付けできる シースルータイプに 金色新登場！

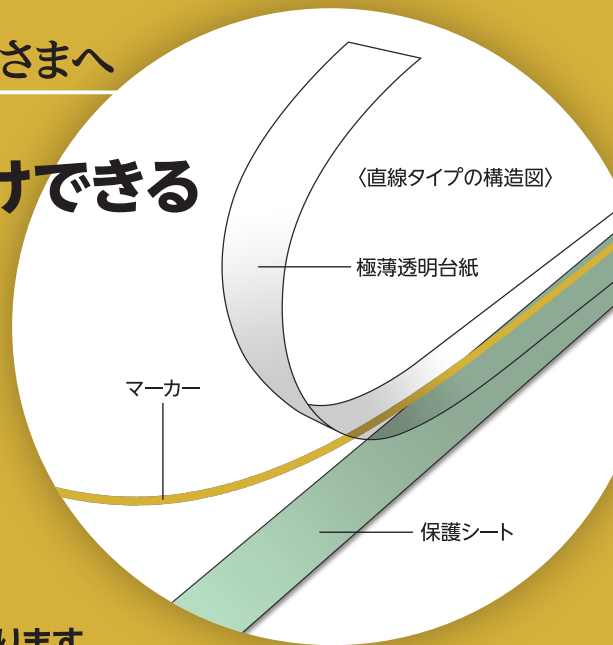


## 特徴


- 金色は肌と同化し、温泉などでも目立ちません。
- 照射時は特殊塗料がレーザーを反射しよくわかります。

## シースルータイプは…

- わずかの水滴で瞬時に貼付く
- 曲面、凹凸を問わずマーキング
- 狙った位置をずらさない

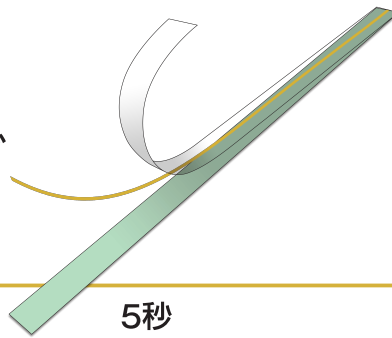

## 厚紙タイプ

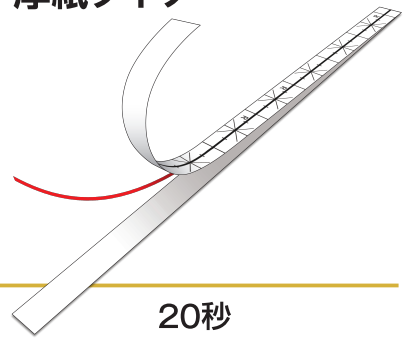

厚紙タイプと比較	貼付け時間	5秒	20秒
	貼付けに要する水分量 (5cm片にスポイトで滴下)	1滴	5滴
	位置決め	直接的 極薄透明台紙上のマーカーを合わせる	間接的 台紙上のガイドを合わせる
	台紙の厚さ	トレーシングペーパー程度の厚みで 肌に沿う	郵便葉書程度の厚みがあり 曲がりにくい

まずは、お気軽に裏面の**無料サンプル**を  
FAXで請求してお試ください。

全く新しい放射線治療のためのボディーマーカーです。



Rポイントマーカー

発売元: 株式会社アールポイント東京  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-4-3-4F  
Tel.03-5542-0950 Fax.03-5542-0951

Rポイントマーカーの  
使い方の動画をこちら→  
でご覧いただけます。



[www.rpoint-tokyo.co.jp](http://www.rpoint-tokyo.co.jp)

# 厚紙タイプからシースルータイプへ移行して見ませんか。

## シースルータイプラインナップ

直線タイプ (サイズ:175×9mm)			十字タイプ (サイズ:22×25mm)		
高輝度	ノーマル	ブラックライト	高輝度	ノーマル	ブラックライト
黒 赤 金	青 黄 白	BL	黒 赤 金	青 黄 白	BL
132枚入 / 16,000円(税別)	115枚入 / 14,000円(税別)	100枚入 / 12,000円(税別)	224枚入 / 16,000円(税別)	98枚入 / 7,000円(税別)	84枚入 / 6,000円(税別)

### 赤色レーザー光線に鋭く反応する高輝度タイプ

顔料層の上に、半透明の高輝度反射層(偏光赤色反射層)があり、レーザー光線の反射率を高め、位置確認の作業性を向上させます。



### 白色は着色が自由自在 ブラックライト(BL)

白色は、その上にマジックなどで自由に着色できますので、細かな色分けが可能になります。色による精密な作業管理が必要な場合に特に有効です。

通常の明かりでは、全く無色透明でつけていることも分かりませんが、ブラックライトの蛍光灯を点けるとはつきりくっきりとラインが浮きます。目立つボディーマーカーをつけたくないという患者さんにピッタリのマーカーです。保ちも通常のRポイントマーカーと同等です。

## シースルータイプは5秒で作業完了!

- 使用する部分を切り離してください。薄青色の保護紙をはがし、接着面を肌につけてください。
- 肌**に強く押しつけますとシワになりますので、強く押しつけないでください。**
- 水やり用スポイトで「Rポイントマーカー」の上に水をたらして台紙を十分に湿らせます。
- 台紙に水が充分にしみ込んだら台紙を横にずらして取除いてください。
- 貼付した「Rポイントマーカー」の上にスポイトで再度水をたらし、表面のデンプン糊をゆるめてください。
- ゆるんだデンプン糊をティッシュで拭き取って完了です。貼付後はお風呂に入ってもしばらくは取れません。取るときには、お肌やさしい専用リムーバーで拭き取ります。

- 貼りつける場所をアルコールなどで拭いて油分を取っておくと長持ちします。
- マーカーの顔料は厚生労働省が許可した化粧品用の顔料を使用しています。
- 安全で信頼できる100%「MADE IN JAPAN」です。
- 素早くキレイに落とせる「専用リムーバー」(別売)もあります。

#### 【ご注意】

- 未滅菌品なので、滅菌済みエリアでは使用しないでください。
- 取れやすさには個人差があります。
- 無害ですが、皮膚に異常を感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- 場合により、衣類に若干うつることがありますのでご注意ください。

### Rポイントマーカーを素早く、きれいに落とす専用リムーバー

貼付位置を修正する場合や、治療終了時に患者様の身体を綺麗にする場合に、落ちにくいRポイントマーカーを素早く、きれいに落とすことができます。

- 35ml入・スポイト付 ●10ml入

主な成分:グリセリル(ベヘン酸/エイコサン二酸)、イソプロピルパルミタート、デキストリン(パルミチン酸/エチルヘキサン酸)、ミネラルオイル

### (財)日本食品分析センターで「無刺激性」と判定されました。

(財)日本食品分析センターに依頼しておりました「皮膚一次刺激性試験」で、Rポイントマーカーは専用リムーバーの使用を含んで「無刺激性」と判定されました。放射線治療ではどうしても皮膚にダメージを与えることになりますので、放射線治療に使用される部材としてのマーカーには皮膚に対して限りなく低刺激であることが要求されますが、今回の「無刺激性」の判定で安心して幅広くご利用いただけることと存じます。

キリトリ

## 無料サンプル請求用紙 ▶ FAX.03-5542-0951

病院名

送付先ご住所 〒

電話番号

担当者名

取扱い業者

希望するサンプルに  
○印で囲んでください。

直線タイプ

高輝度▶  
ノーマル▶  
ブラックライト▶

黒 赤 金  
青 黄 白  
BL

十字タイプ

高輝度▶  
ノーマル▶  
ブラックライト▶

黒 赤 金  
青 黄 白  
BL

その他ご意見、ご要望がありましたら記入ください。