

遅れているマーキング!

近年放射線医療機器は急速な発展を遂げ、ますます精密なピンポイント治療が可能になり
放射線による医療への評価は従来に無く高まってきています。

まだマジックインキ?

一方、精密な医療が可能になっているにもかかわらず、肝心な患者さんの体へのマーキングは
マーキングのための資材が高価であったこともあって、手近にあるマジックなどが使われることが多く
放射線治療機器の進歩発展にも拘らず旧態依然として取り残されていたと言わざるを得ません。

Rポイントマーカ―は

「20秒で作業完了!」「価格が大変安価で、惜しげなく使える」「正確な位置決めが可能である」
「患者さんがそのままお風呂に入れる」「皮膚と一緒に伸縮し、しばらくは落ちない」といった多くの特徴があります。
これからの放射線医療に欠かせない、精密かつ安定したマーキングを可能にし
同時に患者さんの治療中のQOLの向上にも大いに貢献することができます。

患者様の信頼感の向上も

放射線治療を受けられる患者様は、いわば自分の命をかけた治療を受けるわけですから
何よりも精度の高い信頼できる治療を受けたいと望んでいらっしゃいます。
マジックインキなどで書かれた手書きのマーキングは、残念ながら高精度な放射線治療のイメージとはかけ離れたもので
現状では放射線治療に対する信頼感を大きく損なっていると言わざるを得ません。
Rポイントマーカ―による正確なマーキングは
放射線治療の精度に対する信頼感を大きく高め、貴放射線科のイメージアップにも大きく貢献いたします。



Rポイントマーカ―は、発売以来高い評価を頂いており、
お陰様で各地の中核となります有力施設で続々にご採用を頂いております。
肌に転写されるシールの顔料には、
ノーマルタイプと、赤色レーザー光線に鋭く反応する高輝度タイプの2種類をご用意。
シールの台紙には、厚紙タイプと、
目視で複数回貼り直して位置決めが可能なシースルータイプの2種類をご用意しています。

サンプルのご用命、取扱店、その他ご要望については、
お電話、ホームページからご遠慮なくお問い合わせ下さい。

Tel.03-5542-0950 Fax.03-5542-0951
www.rpoint-tokyo.co.jp

全く新しい放射線治療のためのボディーマーカーです。

R POINT-MARKER

Rポイントマーカー

照射部位の形状・位置に対応できる 2種類をご用意しました。


赤色レーザー光線に鋭く反応する高輝度タイプ
顔料層の上に、半透明の高輝度反射層(偏光赤色反射層)があり、レーザー光線の反射率を高め、位置確認の作業性を向上させます。




- 水をを使って簡単に付けることができます。
- 線幅0.7mmで正確な位置決めが可能です。
- 皮膚になじんで伸縮し、ひび割れしません。
- お風呂で洗っても大丈夫です。
- アルコールで拭いても取れません。

保護シートをはがして
台紙に水を含ませることによりマーカーを肌に転写できます。

〈直線タイプの構造図〉

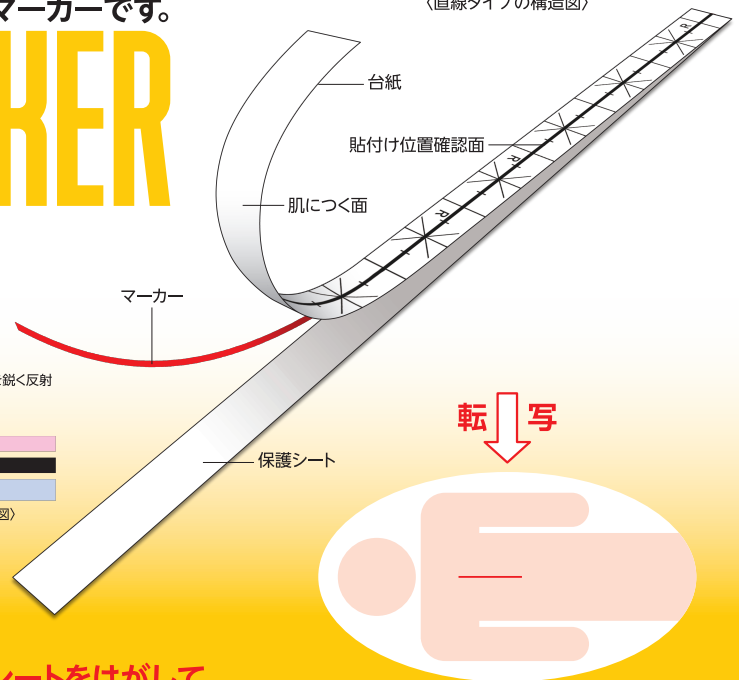


転写

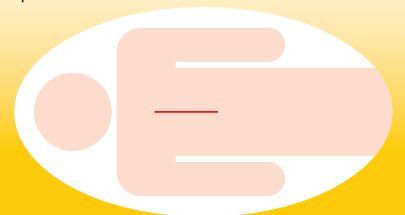

直線タイプ サイズ: 175×9mm **BK黒** **R赤** **B青** **G緑** 緑色は高輝度タイプはありません。

●必要な長さにカットして使用できます。●貼付時に正確に位置合わせができます。●台紙面でもマーカーの色識別ができます。●色は全4色。用途によって色をお選びいただけます。

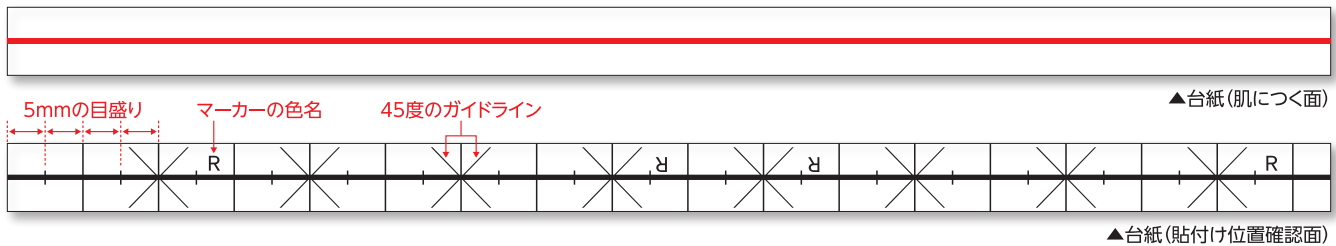


十字タイプ サイズ: 25×25mm

- 貼付時に正確に位置合わせができます。
- 台紙面でもマーカーの色識別ができます。
- 色は全3色。用途によって色をお選びいただけます。




45度のガイドライン
マーカーの色名

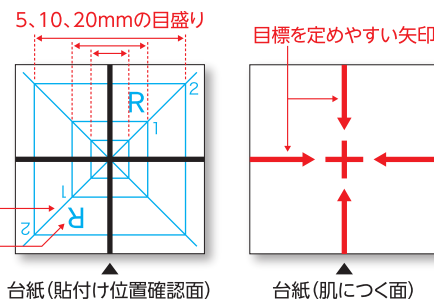

(財)日本食品分析センターで
「無刺激性」と判定されました。

(財)日本食品分析センターに依頼しておりました「皮膚一次刺激性試験」で、Rポイントマーカーは専用リムーバーの使用を含んで「無刺激性」とであると判定されました。放射線治療ではどうしても皮膚にダメージを与えることになりますので、放射線治療に使用される部材としてのマーカーには皮膚に対して限りなく低刺激であることが要求されますが、今回の「無刺激性」の判定で安心して幅広くご利用頂けることと存じます。

Rポイントマーカーの転写は20秒で作業完了!

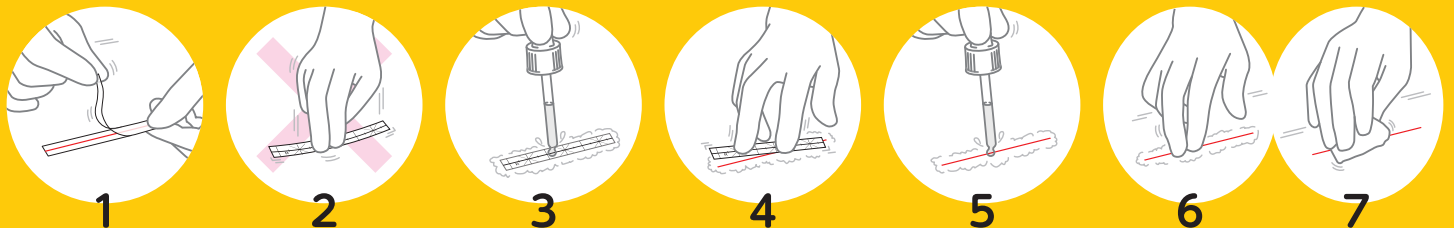

- 貼りつける場所をアルコールなどで拭いて油分を取っておくと長持ちします。
- マーカーの顔料は厚生労働省が許可した化粧品用の顔料を使用しています。
- 安全で信頼できる100%「MADE IN JAPAN」です。
- 素早くキレイに落とせる「専用リムーバー」(別売)もあります。

【ご注意】

- 未滅菌品なので、滅菌済みエリアでは使用しないでください。
- 取れやすさには個人差があります。
- 無害ですが、皮膚に異常を感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- 場合により、衣類に若干うつることがありますのでご注意ください。



Rポイントマーカーを素早く、きれいに落とす専用リムーバー

貼付位置を修正する場合や、治療終了時に患者様の身体を綺麗にする場合に、落ちにくいRポイントマーカーを素早くきれいに落とすことができるので大変便利です。主な成分: (ペヘン酸/エイコサニ酸)グリセリル、イソプロピルパルミテイト、(パルミチン酸/エチルヘキサン酸)デキストリン、ミネラルオイル

発売元: 株式会社アールポイント東京

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-4-3-4F Tel.03-5542-0950 Fax.03-5542-0951

全く新しい放射線治療のためのボディーマーカーです。

R POINT-MARKER

Rポイントマーカー

照射部位の形状・位置に対応できる 2種類をご用意しました。


赤色レーザー光線に鋭く反応する高輝度タイプ
顔料層の上に、半透明の高輝度反射層(偏光赤色反射層)があり、レーザー光線の反射率を高め、位置確認の作業性を向上させます。




- 水を使って簡単に付けることができます。
- 線幅0.7mmで正確な位置決めが可能です。
- 皮膚になじんで伸縮し、ひび割れしません。
- お風呂で洗っても大丈夫です。
- アルコールで拭いても取れません。

保護シートをはがして
台紙に水を含ませることによりマーカーを肌に転写できます。

〈直線タイプの構造図〉

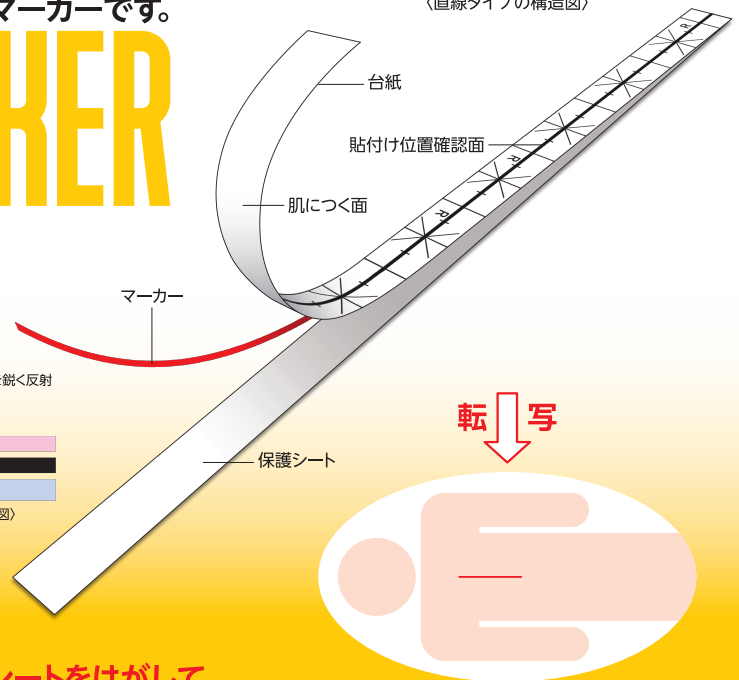


転写

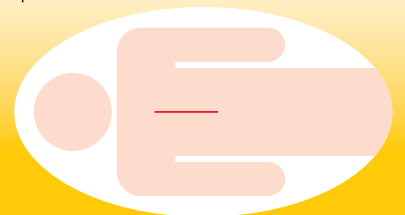

直線タイプ サイズ: 175×9mm **BK 黒** **R 赤** **B 青** **G 緑** 緑色は高輝度タイプはありません。

● 必要な長さにカットして使用できます。● 貼付時に正確に位置合わせができます。● 台紙面でもマーカーの色識別ができます。● 色は全4色。用途によって色をお選びいただけます。

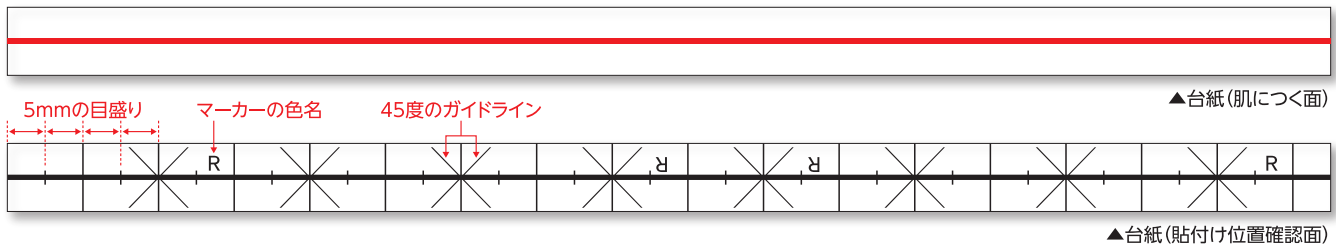


十字タイプ サイズ: 25×25mm

- 貼付時に正確に位置合わせができます。
- 台紙面でもマーカーの色識別ができます。
- 色は全3色。用途によって色をお選びいただけます。




45度のガイドライン
マーカーの色名

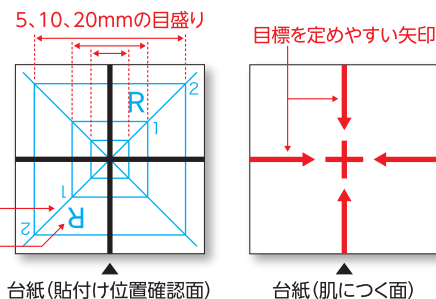

(財)日本食品分析センターで
「無刺激性」と判定されました。

(財)日本食品分析センターに依頼しておりました「皮膚一次刺激性試験」で、Rポイントマーカーは専用リムーバーの使用を含んで「無刺激性」とであると判定されました。放射線治療ではどうしても皮膚にダメージを与えることになりますので、放射線治療に使用される部材としてのマーカーには皮膚に対して限りなく低刺激であることが要求されますが、今回の「無刺激性」の判定で安心して幅広くご利用頂けることと存じます。

Rポイントマーカーの転写は20秒で作業完了!

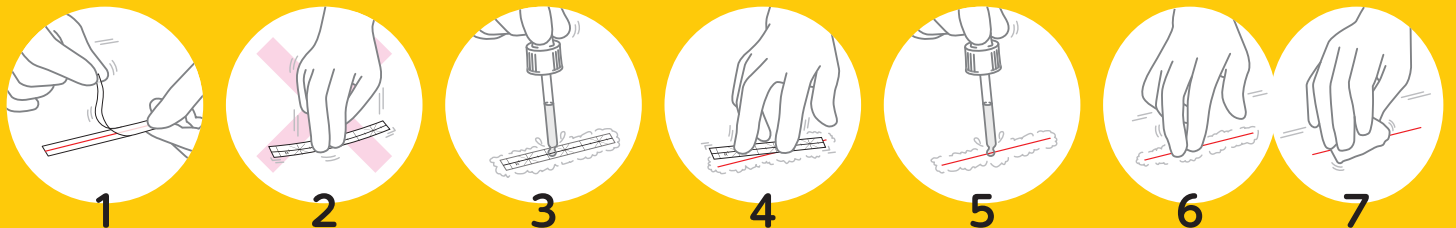

- 貼りつける場所をアルコールなどで拭いて油分を取っておくと長持ちします。
- マーカーの顔料は厚生労働省が許可した化粧品用の顔料を使用しています。
- 安全で信頼できる100%「MADE IN JAPAN」です。
- 素早くキレイに落とせる「専用リムーバー」(別売)もあります。

【ご注意】

- 未滅菌品なので、滅菌済みエリアでは使用しないでください。
- 取れやすさには個人差があります。
- 無害ですが、皮膚に異常を感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- 場合により、衣類に若干うつることがありますのでご注意ください。



Rポイントマーカーを素早く、きれいに落とす専用リムーバー
貼付位置を修正する場合や、治療終了時に患者様の身体を綺麗にする場合に、落ちにくいRポイントマーカーを素早くきれいに落とすことができるので大変便利です。
主な成分: (ペヘン酸/エイコサン二酸)グリセリル、イソプロピルパルミテイト、(パルミチン酸/エチルヘキサン酸)デキストリン、ミネラルオイル

発売元: 株式会社アールポイント東京

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-4-3-4F Tel.03-5542-0950 Fax.03-5542-0951